




번호	아이콘	이름	설명
1		보통 버튼	• 탭하면 보정된 입력 화면이 나타납니다. 개인용 혈당측정기로 측정된 순골 재혈 혈당값을 입력합니다. • 사용자가 원하는 보정할 수 있지만, 반드시 그럴 필요는 없습니다. 보정 옵션이 비활성화 된 경우는 보정할 수 없으므로 지음을 의미합니다. • 보정에 대한 자세한 내용은 5 장참고하십시오.
2		3일 기록 목록	현재 연결된 센서로부터 데이터를 받은 날짜가 표시됩니다. 다른 날짜로 스 와이프하거나 탭하면 해당 날짜의 혈당 트랜드를 볼 수 있습니다.
3		최근 모드	탭하면 기록 모드, 세로 모드로 상호 전환합니다.
4		위젯 내역	위젯 내역 화면으로 이동합니다.
5		혈당 변화량 화살표	이전 측정값 대비 현재 측정값의 변화를 표시합니다. 각 정은 5분이 단. 센서가 측정된 혈당값에 대한 자세한 내용은 '변화량 화살표'를 참고하십시오.
6		103 혈당 수치	센서가 마지막으로 측정된 혈당값이 표시되며, 경우에 따라 다음과 같이 표시됩니다. • -- : 25분 안에 받은 데이터가 없는 경우 • Low: 40 mg/dL 미만인 경우 • High: 500 mg/dL 초과인 경우
7		오늘 GSM 및 마지막 시간	혈당 수치가 마지막으로 수신된 날짜 및 시간이 표시됩니다.

**변화량 화살표**  
변화량 화살표는 이전 측정 혈당값 대비 마지막 측정 혈당값의 변화 속도와 방향을 보여줍니다. 홈 화면에서 마지막 측정 혈당값 우측에 화살표로 표시합니다.

변화량 화살표	혈당 변화 상태	설명
	안정적	혈당값이 지난 30분 동안 30 mg/dL 이하로 증가 또는 감소하고 있습니다.
	서서히 증가	혈당값이 지난 30분 동안 31 ~ 60 mg/dL 증가하고 있습니다.
	증가	혈당값이 지난 30분 동안 61 ~ 90 mg/dL 증가하고 있습니다.
	빠르게 증가	혈당값이 지난 30분 동안 91 mg/dL 이상 증가하고 있습니다.
	서서히 감소	혈당값이 지난 30분 동안 31 ~ 60 mg/dL 감소하고 있습니다.
	감소	혈당값이 지난 30분 동안 61 ~ 90 mg/dL 감소하고 있습니다.
	빠르게 감소	혈당값이 지난 30분 동안 91 mg/dL 이상 감소하고 있습니다.
	알 수 없음	혈당값 변화의 속도와 방향을 계산할 수 없습니다.

**혈당 트랜드 이해하기**  
사용자는 홈 화면의 혈당 트랜드를 이해하고 혈당 변화 추세를 파악하면 단근과를 더 잘 효과적으로 할 수 있습니다. 가장 최근에 측정된 혈당값이 표시되고 이전 혈당값 대비 혈당 변화 속도와 방향이 화살표로 표시됩니다. 혈당 변화 화살표에 대한 자세한 내용은 '변화량 화살표'를 참고하십시오.

혈당 트랜드를 이해하면 혈당값 구간 및 변화 속도와 방향에 따른 적절한 단근과 방향을 시간에 결정할 수 있습니다. 이는 혈당값이 목표 범위를 벗어는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 혈당 트랜드 보기를 이해할 수 있도록 아래의 예를 참고하십시오.

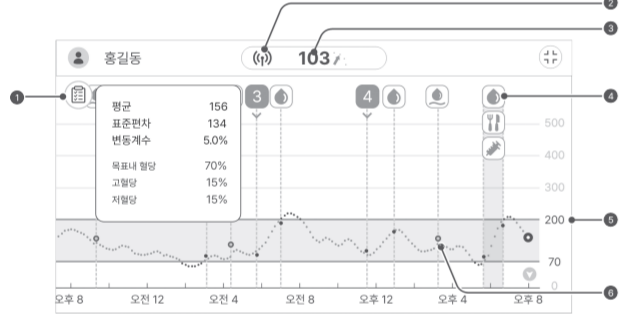


번호	이름	설명
1	혈당 트랜드의 통계 자료를 활용하여 일정 기간 동안의 혈당값 관리 현황을 확인합니다. 목표나 혈당 범위를 넘은 데 기록된 바가 큰 경우는 혈당 변화가 크다는 의미입니다. 기간 내 센서가 정상으로 작동했다면 이벤트형 화면에서 연령적인 수치를 유지할 수 있도록 생활 습관을 개선합니다.	
2	홈에 부착한 센서의 연결 상태가 정상으로 작동하고 있습니다. 센서 신호 수신 빈위를 벗어나는 경우 알림이 옵니다.	
3	마지막 측정 혈당값은 103 mg/dL로 목표 범위에 속합니다. 이전 측정값 대비 상승하고 있으나 목표 범위 안에서 상승하고 있습니다. 다만, 측정 혈당값이 103 mg/dL(미터로 환산)을 넘을 때 30분 후에는 160 mg/dL 이상으로 증가할 수 있는 상황입니다. * 7 는 혈당값이 지난 30분 동안 61 ~ 90 mg/dL 증가하고 있는 것을 의미합니다. 자세한 내용은 '변화량 화살표'를 참고하십시오. 이 경우 바르젠 Fx를 사용하는 사용자나 개인용 혈당측정기를 사용하는 사용자에 대한는 달라질 수 있습니다.	
4	* 바르젠 Fx 사용 시: 혈당 트랜드를 이해하면 변화량 화살표 볼 때 30분 후에는 160 mg/dL 이상으로 증가할 수 있습니다. 따라서, 그레프의 추이를 지켜보며 상한선 목표값 시도가 발생할지 않도록 혈당을 관리하는 데 도움이 줄 수 있습니다. * 개인용 혈당측정기 사용자 시: 알림이 급격하게 증가할 경우 30분 후에는 160 mg/dL 이상으로 증가할 수 있지만, 사용자는 순골 재혈 혈당값을 다시 측정하여 정정하는 혈당값의 변화를 확인할 수 있습니다. 따라서 재혈당 시도가 발생할지 언제든 조치하여 주시기 바랍니다.	
5	혈당 트랜드에 표시된 이벤트트를 확인하면 사용자의 생활 습관에 따른 혈당값의 변화를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 일주일 동안 매일 30 분씩 조깅을 하면 고혈당 값이 목표 범위로 내려가고 꾸준히 유지됨을 확인할 수 있습니다.	
6	일일 혈당값 설정을 저혈당 70 mg/dL, 고혈당 200 mg/dL로 설정하였습니다. 혈당 수치가 목표 범위 내에서 변화하지 않습니다.	
7	정상적으로 변경된 보정값을 혈당 트랜드에서 확인할 수 있습니다.	

**이전 데이터 보기**  
홈 화면 좌측의 세로 메뉴 우측으로 드로그하면 이전 데이터를 확인할 수 있습니다. 동일한 사용자 계정으로 사용 오드 센서의 데이터도 확인할 수 있습니다. 센서 사용 기간 전체에 대한 3일간 혈당 트랜드 화면이 나타납니다. 과거 혈당 트랜드를 확인하려면 다음의 절차를 따르세요.

- 홈 화면 좌측의 이전 데이터 보기를 우측으로 드로그합니다.
- 이전 데이터 보기 화면에서 일지 구간을 선택하세요. 상세 화면이 나타납니다. 상세 화면에서 X를 탭하면 홈 화면으로 돌아갑니다.

**일일 내역**  
홈 화면 우측 상단의 을 탭하면 일일 내역을 확인할 수 있습니다. 일일 사용 중 발생한 일일 알림(매우 낮음, 저혈당, 고혈당, 급변동), 센서 알림 및 건강관리자 연결 알림 기록을 확인할 수 있습니다.

- 일일 내역 화면을 확인하려면 다음 절차를 따르세요.
- 홈 화면 우측 상단의 을 탭하세요. 일일 내역 화면이 나타납니다.
- X를 탭하면 홈 화면으로 돌아갑니다.

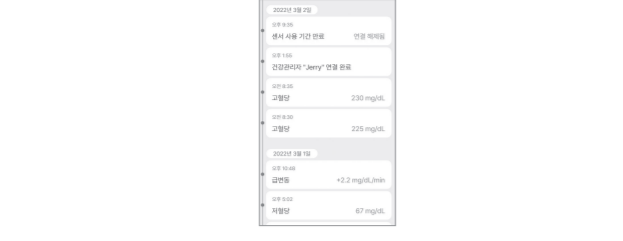

**3.4 앱 기능 살펴보기**  
**위젯 실행하기**  
바르젠 Fx를 사용하는 사용자나 스마트 기기의 바탕 화면에서 바로 사용할 수 있도록 전환할 기능을 많이 위젯으로 제공합니다. 바르젠 Fx 위젯에는 센서 연결 상태, 센서 혈당값, 혈당 변화량 화살표, 3일 기록 목록, 최근 모드, 위젯 내역, 알림 내역 위젯이 있습니다.

Android 위젯은 다음과 같이 3가지 유형이 있습니다.



iOS 위젯은 다음과 같이 제공됩니다.

번호	이름	설명
1	혈당 정보	센서 연결 상태, 혈당값, 혈당 변화 화살표로 구성됩니다. 탭하면 홈 화면으로 이동합니다.
2	보정값 입력	* 이 화면은 홈 보정값을 입력할 수 있습니다. * 을 탭하면 '보정값 입력' 화면이 나타납니다. * 이 화면의 목표 보정값을 입력할 수 없습니다.
3	이벤트 입력	을 탭하면 '이벤트 입력' 화면이 나타납니다.

**보정값 입력하기**  
사용자는 개인용 혈당측정기로 순골 재혈 혈당값을 측정하여 바르젠 Fx의 보정값으로 입력합니다.

- 홈 화면 하단의 을 탭하세요. 보정값 입력 화면이 나타납니다.
- 개인용 혈당측정기로 순골 재혈 혈당값을 측정하세요.
- 5분 이내에 순골 재혈 혈당값을 입력해 주십시오.
- 홈 화면의 혈당 트랜드에서 보정값이 반영되었는지 확인하세요.
  - 보정값을 입력 날짜와 시간에 혈당 트랜드의 하늘색 점으로 표시됩니다.




**설정 변경하기**  
다음 표에서는 설정 화면의 아이콘과 기능에 대해 설명합니다. 홈 화면에서 하단의 을 탭하면 설정 화면이 나타납니다.

아이콘	이름	설명
	바르젠 Fx 웹사이트	바르젠 Fx 웹사이트로 이동합니다.
	문의하기	'문의하기' 화면으로 이동합니다.
	고객센터	고객센터와 통화 연결이 가능한 창이 나타납니다.
	구매하기	제품 구매 가능한 웹사이트로 이동합니다.
	남은 사용 기간	센서의 남은 유효기간이 표시됩니다.
	연결 상태	센서가 정상적으로 연결된 경우 '사용 중', 센서가 동적으로 연결된 경우 '미연결'로 표시됩니다.
	일련번호	센서에 부여된 고유번호입니다.
	센서 시작 시간	센서가 측정을 시작한 날짜가 표시됩니다.
	연결 관리	* 연결 해제: 탭하면 센서 중인 센서의 연결을 해제합니다. * '미연결' 경우 <b>신규 연결</b> 이 나타납니다. 센서 연결에 대한 자세한 내용은 3.2 센서 연결하기를 참고하십시오.
	마지막 보정 시간	마지막으로 보정된 시간을 표시합니다.
	무음 모드	* 모든 알림을 무음으로 설정합니다. * 무음 모드 제외 알림 - 신호 수신, 센서 오류, 센서 안정화, 센서 오류
	매우 낮음	알림을 받을 '매우 낮음' 기준치를 입력하고 알림 방법을 선택할 수 있습니다.
	저혈당	알림을 받을 '저혈당' 기준치를 입력하고 알림 방법을 선택할 수 있습니다.
	고혈당	알림을 받을 '고혈당' 기준치를 입력하고 알림 방법을 선택할 수 있습니다.
	급변동	알림을 받을 '급변동' 수치를 선택하고 알림 방법을 선택할 수 있습니다.
	기타	신호 수신, 센서 오류, 예외, 신호 이상 감지의 알림 방법을 설정할 수 있습니다.
	알려주기	혈당값과 알림을 음성 안내로 받을 수 있습니다.
	앱 잠금	앱 잠금 기능을 설정할 수 있습니다.
	건강관리자	데이터를 바르젠 Care 앱에 공유할 수 있습니다. 예를 들어 일주일 동안 매일 30 분씩 조깅을 하면 고혈당 값이 목표 범위로 내려가고 꾸준히 유지됨을 확인할 수 있습니다.
	개인용 혈당측정기	개인용 혈당측정기를 등록하여 스마트 기기와 연결합니다.
	마지막 업데이트	마지막으로 업데이트된 시간을 표시합니다.
	지급importo	입금정보를 탭하면 입력된 데이터가 클라우드 서버에 저장됩니다.
	데이터 연동 및 내보내기	상당 섹션, 애플 헬스 연동 및 데이터 공유를 설정합니다.
	단위	사용중인 혈당 단위를 표시합니다.
	차트 Y축	차트에 표시되는 Y축의 최대값을 설정합니다.
	사용법	제품 관련 자료를 확인할 수 있는 웹페이지로 이동합니다.
	도움말	바르젠 Fx 도움말 화면으로 이동합니다.
	공지사항	'공지사항' 화면으로 이동합니다.
	앱 정보	앱 현재 버전이 표시됩니다. 사용자의 스마트 기기에 설치되지 않은 최신 버전이 있는 경우, 현재 버전으로 업데이트 표시됩니다. 최신 버전 업데이트에 대한 자세한 내용은 앱 업데이트화기를 참고하십시오.

**앱 업데이트하기**  
스마트 기기에 설치되지 않은 최신 버전의 바르젠 Fx 앱이 있는 경우 설정 화면에 표시됩니다. 업데이트를 클릭하면 앱이 자동으로 다운로드되어 설치됩니다. 바르젠 Fx 앱을 최신 버전으로 업데이트하려면 다음의 절차를 따르세요.

- 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
- 설정 화면에서 앱 정보의 >를 탭하세요.
- 업데이트 화면에서 업데이트를 탭하세요. 최신 버전이 있는 경우에만 업데이트가 활성화됩니다.
- 업데이트를 탭하면 업데이트를 탭하세요. 앱 스토어로 이동합니다.
- 앱 스토어에서 최신 버전을 다운로드하여 설치하세요. 기존의 데이터는 손실되지 않고 업데이트된 버전으로 업데이트됩니다.

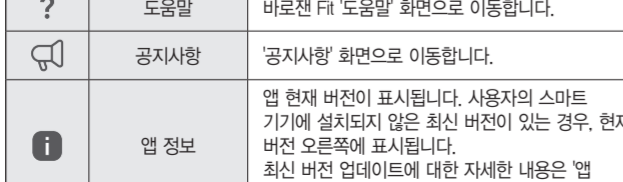

설정을 변경하면 다음의 절차를 따르세요.


- 홈 화면 하단의 을 탭하세요.

- 설정 화면에서 항목을 수정한 후 적용을 선택하세요. 수정 가능한 항목은 다음과 같습니다.
  - 알림: 알림 소리, 진동, 소리와 함께, 무음 중에서 선택하세요.
  - 알림이 울릴 때: 알림의 음성 알림 시퀀스 여부를 선택하세요.
  - 알림: 알림: 알림을 받을 고혈당, 저혈당 수치를 입력하세요.
  - 알림: 알림: 알림을 받을 기준 변동값을 2 mg/dL/min 초과, 3 mg/dL/min 초과 중에서 선택하세요.
  - 기타: 신호 수신, 센서 오류, 예외, 신호 이상 감지 알림을 받도록 여부를 설정하세요.
  - 차트 Y축: 차트 Y축 최대값을 자동, 300 mg/dL, 400 mg/dL, 500 mg/dL 중 선택하세요.

**앱 잠금 설정하기**  
개인 정보 보호를 위해 앱 잠금 기능을 설정할 수 있습니다. 앱 잠금을 설정하려면 다음의 절차를 따르세요.

- 홈 화면 하단의 을 탭하세요. 설정 화면이 나타납니다.
- 앱 잠금의 >를 탭하세요.
- 을 탭하세요.
- 잠금 길이 4시간을 터치하세요.
- 확인을 입력하세요.

- 잠금 설정이 완료되면 앱에 잠금lock 아이콘을 입력해야 합니다.
- 잠금 암호를 잊어버린 경우, 화면의 안내에 따라 잠금 설정을 진행한 후 암호를 재설정할 수 있습니다.

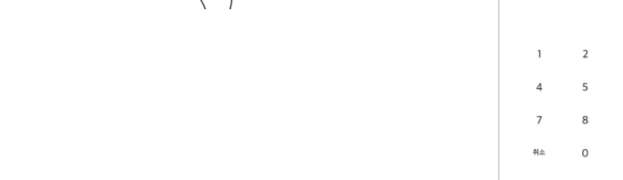


**혈당측정기 연결하기**  
혈당측정기를 바르젠 Fx 앱에 연결한 후 혈당측정기의 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

- 혈당측정기를 연결하려면 다음의 절차를 따르세요.
1. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
2. 건강관리자를 탭하세요.
3. '건강관리자' 화면에서 '건강관리자 연결'을 탭하세요.
4. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
5. '네이보드 입력' 화면에서 전달 받은 QR코드를 입력하고 확인을 탭하세요.
6. QR코드가 유효한 경우, 건강관리자 확인 메시지가 표시되며, 연결하려는 건강관리자가 있는지 확인하고 확인을 탭하세요.
7. '건강관리자' 화면에서 '건강관리자 연결'을 탭하세요.
8. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
9. '건강관리자' 화면에서 '건강관리자 연결'을 탭하세요.
10. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
11. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
12. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
13. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
14. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
15. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
16. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
17. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
18. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
19. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
20. 바르젠 Fx 앱을 실행한 후, 홈 화면 하단의 을 탭하세요.

개인용 혈당측정기의 연결을 완료 후 블루투스 연결을 탭하세요. 블루투스 연결을 탭하면 블루투스 기종에 따라 다음을 표시합니다.

1. 블루투스 연결을 탭하세요.
2. 블루투스 연결을 탭하세요.
3. 블루투스 연결을 탭하세요.
4. 블루투스 연결을 탭하세요.
5. 블루투스 연결을 탭하세요.
6. 블루투스 연결을 탭하세요.
7. 블루투스 연결을 탭하세요.
8. 블루투스 연결을 탭하세요.
9. 블루투스 연결을 탭하세요.
10. 블루투스 연결을 탭하세요.
11. 블루투스 연결을 탭하세요.
12. 블루투스 연결을 탭하세요.
13. 블루투스 연결을 탭하세요.
14. 블루투스 연결을 탭하세요.
15. 블루투스 연결을 탭하세요.
16. 블루투스 연결을 탭하세요.
17. 블루투스 연결을 탭하세요.
18. 블루투스 연결을 탭하세요.
19. 블루투스 연결을 탭하세요.
20. 블루투스 연결을 탭하세요.

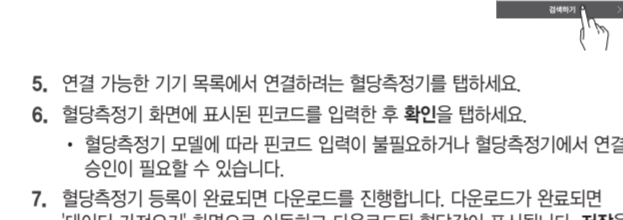

연결 가능한 기기 목록에서 연결하려는 혈당측정기를 탭하세요.

1. 혈당측정기 화면에 표시된 핀코드를 입력한 후 확인을 탭하세요.
- 혈당측정기 모델에 따라 핀코드 입력이 필요하거나 혈당측정기에서 연결 승인이 필요할 수 있습니다.



**데이터 업로드하기**  
스마트 기기에 설정된 바르젠 Fx 앱의 모든 데이터를 클라우드 서버에 저장하고 사용할 수 있습니다.

- 연일 데이터를 업로드하려면 다음의 절차를 따르세요.
1. 홈 화면 하단의 을 탭하세요. 설정 화면이 나타납니다.
2. 앱의 데이터를 클라우드 서버에 즉시 저장하려면 업로드를 탭하세요.


**데이터 연동 및 내보내기**  
바르젠 Fx 앱 데이터를 다른 앱과 연동하여 공유할 수 있습니다.

1. 홈 화면 하단의 을 탭하세요. 설정 화면이 나타납니다.
2. 데이터 연동 및 내보내기를 탭하세요.
3. 데이터 공유를 지원하는 앱을 표시합니다. 데이터를 공유하려면 을 탭하세요.
4. 데이터 CSV 파일로 저장하려면 데이터 내보내기(CSV)를 탭하세요.



**앱 업데이트하기**  
스마트 기기에 설치되지 않은 최신 버전의 바르젠 Fx 앱이 있는 경우 설정 화면에 표시됩니다. 업데이트를 클릭하면 앱이 자동으로 다운로드되어 설치됩니다. 바르젠 Fx 앱을 최신 버전으로 업데이트하려면 다음의 절차를 따르세요.

- 홈 화면 하단의 을 탭하세요.
- 설정 화면에서 앱 정보의 >를 탭하세요.
- 업데이트 화면에서 업데이트를 탭하세요. 최신 버전이 있는 경우에만 업데이트가 활성화됩니다.
- 업데이트를 탭하면 업데이트를 탭하세요. 앱 스토어로 이동합니다.
- 앱 스토어에서 최신 버전을 다운로드하여 설치하세요. 기존의 데이터는 손실되지 않고 업데이트된 버전으로 업데이트됩니다.

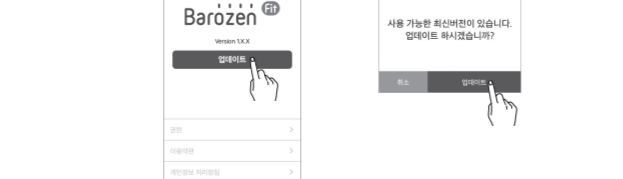

**3.5 로그아웃하기**  
앱에서 로그아웃하려면 다음의 절차를 따르세요.

1. 홈 화면 하단의 을 탭하세요. 설정 화면이 나타납니다.
2. 로그아웃하려면 '로그아웃' 화면에서 로그아웃을 탭하세요.
3. 로그아웃이 완료되면 로그아웃을 탭하세요.



**3.6 블루투스 모드 (전용) 사용**  
블루투스 모드를 위해서는 반드시 전용용 센서(모델명: CGM-ST-013)를 사용해야 합니다. 전용용 센서 사용에 대해서는 의료전문가와 상의하세요.

**3.7 블루투스 모드 (전용) 사용**  
블루투스 모드를 위해서는 반드시 전용용 센서(모델명: CGM-ST-013)를 사용해야 합니다. 전용용 센서 사용에 대해서는 의료전문가와 상의하세요.

**블라인드 모드 사용**  
블라인드 모드는 바르젠 Fx의 건강관리자 바르젠 Care 앱에서 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 바르젠 Care 앱 메뉴를 참조하세요.

**4. 위치 앱 사용하기**  
바르젠 Fx 위치 앱은 설치된 스마트 워치를 이용하여 바르젠 Fx 앱이 설치된 스마트 기기로부터 수신된 혈당값을 확인할 수 있습니다.

**4.1 위치 앱 설치하기**  
스마트 기기에 설치하기

1. 스마트 워치에서 '블라인드 모드'를 실행하세요.
2. 바르젠 Fx 또는 'Barozen Fx'를 검색하세요.
3. '설치'를 탭하세요. 스마트 기기에 설치된 후 스마트 워치에 앱 설치가 자동으로 진행됩니다.

**4.2 위치 앱 화면 이해하기**  
기본 정보

다음 표에서는 위치 앱 화면의 기본 정보에 대해 설명합니다.

번호	아이콘	이름	설명
1		연결 상태	스마트 기기와 센서 사이의 블루투스 통신 상태가 표시됩니다.
2		혈당 통계	혈당 수치기 마지막으로 수신된 날짜 및 시간이 표시됩니다.
3		센서 연결 상태	* 연결 해제: 탭하면 센서 중인 센서의 연결을 해제합니다. * '미연결' 경우 <b>신규 연결</b> 이 나타납니다. 센서 연결에 대한 자세한 내용은 3.2 센서 연결하기를 참고하십시오.
4		혈당 변화량 화살표	이전 측정값 대비 현재 측정값의 변화를 표시합니다.
5		차트 Y축	차트에 표시되는 Y축의 최대값을 설정합니다.
6		혈당 트랜드	블라인드 모드에서 고혈당 값으로 표시되어 고지혈당 기준이 표시되어 있습니다.

**블라인드 모드 홈 화면**  
다음 표는 블라인드 모드에서 홈 화면의 구성을 설명합니다.

번호	이름	설명
1	블라인드 모드 표시	현재 앱이 블라인드 모드임을 표시합니다.
2	혈당 통계	블라인드 모드에서 확인할 수 없습니다.
3	센서 연결 상태	스마트 기기와 센서 사이의 블루투스 통신 상태가 표시됩니다.
4	혈당 변화량 화살표	* 연결 해제: 탭하면 센서 중인 센서의 연결을 해제합니다. * '미연결' 경우 <b>신규 연결</b> 이 나타납니다. 센서 연결에 대한 자세한 내용은 3.2 센서 연결하기를 참고하십시오.
5	차트 Y축	차트에 표시되는 Y축의 최대값을 설정합니다.
6	혈당 트랜드	블라인드 모드에서 고혈당 값으로 표시되어 고지혈당 기준이 표시되어 있습니다.

**블라인드 모드 위젯**  
블라인드 모드에서 Android 위젯은 다음과 같이 3가지 유형이 있습니다.

번호	아이콘	이름	설명
1		연결 상태	스마트 기기와 센서 사이의 블루투스 통신 상태가 표시됩니다.
2		혈당 통계	혈당 수치기 마지막으로 수신된 날짜 및 시간이 표시됩니다.
3		센서 연결 상태	* 연결 해제: 탭하면 센서 중인 센서의 연결을 해제합니다. * '미연결' 경우 <b>신규 연결</b> 이 나타납니다. 센서 연결에 대한 자세한 내용은 3.2 센서 연결하기를 참고하십시오.
4		혈당 변화량 화살표	이전 측정값 대비 현재 측정값의 변화를 표시합니다.

**블라인드 모드에서 iOS 위젯은 다음과 같이 제공됩니다.**

번호	아이콘	이름	설명
1		연결 상태	스마트 기기와 센서 사이의 블루투스 통신 상태가 표시됩니다.
2		혈당 통계	혈당 수치기 마지막으로 수신된 날짜 및 시간이 표시됩니다.
3		센서 연결 상태	* 연결 해제: 탭하면 센서 중인 센서의 연결을 해제합니다. * '미연결' 경우 <b>신규 연결</b> 이 나타납니다. 센서 연결에 대한 자세한 내용은 3.2 센서 연결하기를 참고하십시오.
4		혈당 변화량 화살표	이전 측정값 대비 현재 측정값의 변화를 표시합니다.

**앱 잠금 설정**  
다음 표는 블라인드 모드에서 알림 방법과 종류에 대해 설명합니다.

번호	아이콘	이름	설명
1		무음 모드	* 모든 알림을 무음으로 설정합니다. * 무음 모드 제외 알림 - 신호 수신, 센서 오류, 센서 안정화, 센서 오류
2		매우 낮음	알림을 받을 '매우 낮음' 기준치를 입력하고 알림 방법을 선택할 수 있습니다.
3		저혈당	알림을 받을 '저혈당' 기준치를 입력하고 알림 방법을 선택할 수 있습니다.
4		고혈당	알림을 받을 '고혈당' 기준치를 입력하고 알림 방법을 선택할 수 있습니다.
5		급변동	