

사용설명서

Barozen Care 웹





이 사용설명서는 바로젠 Care 웹의 올바른 사용을 돕기 위한 것입니다.

바로젠 Care가 연결하는 센서 사용자는 ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템을 사용하는 사용자입니다.

사용하기 전에 이 사용설명서를 자세히 읽고 모든 유의 사항을 준수하세요.

## 참고

바로젠 Care 웹을 사용하기 전에 본 사용설명서를 반드시 숙지하세요. 바로젠 Care는 ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자의 혈당 정보에 대한 보조 뷰어로 사용자의 혈당 정보를 수정 없이 그대로 전달하는 용도로만 사용해야 합니다. 병의 진단이나 치료 결정에 바로젠 Care를 사용해서는 안 됩니다. 바로젠 Care는 ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자의 혈당 정보의 실시간 수신을 보장하지 않습니다.

# 목차

사용하기 전에.....	6
안전 정보.....	6
<b>1 바로젠 Care 웹 이해하기.....</b>	<b>8</b>
사용 목적.....	8
작용 원리.....	8
<b>2 바로젠 Care 웹 권장사항.....</b>	<b>9</b>
2.1 권장 운영체제.....	9
<b>3 바로젠 Care 웹 사용하기.....</b>	<b>10</b>
3.1 로그인하기.....	11
바로젠 Care 웹 실행하기.....	11
회원 가입하기.....	12
비밀번호 재설정하기.....	14
로그인하기.....	16
사용자 모드 선택하기.....	17
3.2 센서 사용자 리스트 확인하기(건강관리자 모드).....	18
리스트에서 센서 사용자 보고서 확인하기.....	18
즐거찾기 추가하기.....	19
대기목록 추가하기.....	20
3.3 그룹 관리하기(건강관리자 모드).....	21
그룹 추가하기.....	21
그룹명 수정하기.....	22
센서 사용자 추가하기.....	23
센서 사용자 초대하기.....	24
건강관리자 초대하기.....	27
건강관리자 관리하기.....	28
그룹 삭제하기.....	30

<b>3.4</b>	<b>보고서 확인하기</b> .....	<b>31</b>
<b>3.5</b>	<b>설정하기</b> .....	<b>34</b>
	프로필 정보 변경하기 .....	34
	(주)한독 계정 관리하기 .....	35
	비밀번호 재설정하기 .....	36
	연결 서비스 관리하기 .....	37
	회원 탈퇴하기 .....	38
	사용자 모드 변경하기 .....	39
	나의 데이터 공유하기 .....	40
	받은 초대 수락하기 .....	42
	언어 변경하기 .....	43
	당뇨 유형별 기준값 설정하기 .....	44
	AGP 보고서 기준 설정 .....	45
<b>부록 A</b>	<b>기술정보</b> .....	<b>46</b>
<b>A.1</b>	<b>성능</b> .....	<b>46</b>
	기타 표시기재사항 .....	47
<b>A.2</b>	<b>사이버보안</b> .....	<b>48</b>

# 사용하기 전에

- 본 제품에서는 사용자의 동의 하에 수집된 개인 정보만을 취급합니다.
- 제품에 대한 자세한 내용은 판매업체에 문의하거나 홈페이지를 방문하세요.
- 소프트웨어를 동작할 기기의 전원이 켜져 있는지 그리고 유/무선 네트워크가 연결되어 있는지 확인하세요.

## 참고

- 표준 및 규정에 대한 모든 언급은 이 사용설명서의 발행일 기준으로 유효합니다.
- (주)한독은 사용설명서에 포함된 정보가 정확하도록 주의 깊게 준비했습니다. 그러나 (주)한독은 이 사용설명서에서 발생할 수 있는 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다. (주)한독은 제품의 신뢰성, 기능 또는 디자인을 개선하기 위해 본 사용설명서에 설명된 제품 또는 관련 소프트웨어 응용 프로그램을 추후 통지없이 변경할 수 있습니다.
- 이 문서는 저작권법에 의해 보호됩니다. (주)한독의 사전 승인 없이 본 사용설명서를 복제하거나 개조하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.

## 안전 정보

### 중요한 사용자 정보

- 바로젠 Care를 사용하기 위해서는 (주)한독 계정에 가입해야 합니다.
- 바로젠 Care는 (주)한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자의 혈당 정보에 대한 보조 뷰어로 사용자의 혈당 정보를 수정 없이 그대로 전달하는 용도로만 사용해야 합니다. 병의 진단이나 치료 결정에 바로젠 Care를 사용해서는 안 됩니다. 바로젠 Care는 (주)한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자의 혈당 정보의 실시간 수신을 보장하지 않습니다.
- 바로젠 Care를 사용하기 전에 경고, 주의사항을 읽고 이해한 뒤 엄격하게 준수해야 합니다. 바로젠 Care는 사용설명서의 안내 방법에 따라 사용해야 합니다.

## 경고

- 바로젠 Care의 혈당 정보를 토대로 ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자, 가족, 보호자는 치료 결정을 내려서는 안 됩니다. 또한, 바로젠 Care는 어떠한 의료 자문도 제공하지 않으며, 그러한 목적으로 사용되어서는 안 됩니다. 치료 결정을 내리기 위해서는 의료전문가와 상담해야 합니다.
- 의료기관 및 의료전문가는 바로젠 Care에서 제공되는 혈당 정보만으로 치료 결정이나 분석에 사용해서는 안 됩니다.

## 주의

- ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자는 혈당 정보를 건강관리자(가족, 보호자, 의료기관, 의료진)에게 보내기 위해 공유 기능을 켜야 하고, 건강관리자(가족, 보호자, 의료기관, 의료진)들이 공유된 내용을 보려면 바로젠 Care를 다운받고 반드시 ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자와 연결해야 합니다.
- 건강관리자가 바로젠 Care를 통해 ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자의 정보를 보기 위해서는 ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자 및 건강관리자의 스마트 기기가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
- ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자나 건강관리자(가족, 보호자, 의료기관, 의료진)의 스마트 기기가 꺼져 있거나, 비행기 모드이거나, 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 혈당 정보를 전송하거나 전송 받지 못할 수 있습니다.
- 건강관리자(가족, 보호자, 의료기관, 의료진)는 ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자의 혈당을 관리하면 안 됩니다. ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자가 혈당 관리에 있어 주체가 되어야 하고 ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자는 필요한 조치를 취하기 위해 건강관리자(가족, 보호자, 의료기관, 의료진)에 의존하지 않습니다.
- 건강관리자(가족, 보호자, 의료기관, 의료진)가 연결을 해제하는 경우, ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자가 보낸 내용을 볼 수 없고 다시 ㈜한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자와 연결해야 볼 수 있습니다.

# 1 바로젠 Care 웹 이해하기

## 사용 목적

원격진료를 위해 유헬스케어 의료기기에서 측정된 생체정보를 유무선 기술을 통하여 수집하고 수집된 생체정보를 암호화하여 의료기관으로 전송하는 소프트웨어.

## 작용 원리

본 제품은 원격진료를 위해서 데이터 전송이 가능한 기 허가된 (주)한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템(Continuous Glucose Monitoring System)을 통해 수집 및 처리된 혈당 정보를 저장하고, Windows, Mac OS, 태블릿에서 웹 브라우저를 통해 정보를 표시하는 2차 디스플레이용 소프트웨어입니다. (주)한독이 판매하는 개인용 체내 연속 혈당 측정 시스템에 의해 수집 및 처리된 혈당정보를 SSL(Secure Sockets Layer) 암호화 프로토콜을 이용하여 건강관리자(가족, 보호자, 의료기관, 의료진)에게 안전하게 전송할 수 있습니다.

## 2 바로젠 Care 웹 권장사양

바로젠 Care 웹을 이용하시려면 웹 브라우저가 필요합니다.

### 2.1 권장 운영체제

#### 참고

바로젠 Care 웹 사이트는 권장 브라우저의 최신 버전에 최적화되어 있습니다. 지원되지 않는 브라우저에서는 사이트의 일부 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

운영체제	해상도
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari	1280 x 800 px 이상

# 3 바로젠 Care 웹 사용하기

사용자는 바로젠 Care 웹을 실행하여 바로젠 Fit 앱에서 센서가 측정한 혈당값을 모니터링할 수 있습니다. 바로젠 Care 웹에 로그인하려면 회원가입이 필요합니다. 바로젠 Care 웹이 제공하는 여러 기능을 활용하면 더욱 효율적인 당뇨관리가 가능합니다.


이 장을 통해 사용자는

1. 바로젠 Care 웹에 회원가입한 후 로그인할 수 있습니다.
2. 센서 사용자 리스트를 확인할 수 있습니다.
3. 그룹, 센서 사용자, 건강관리자 관리를 할 수 있습니다.
4. 보고서 화면을 보고 혈당 보고서를 확인 할 수 있습니다.
5. 설정 변경을 통해 기본 정보 변경 및 (주)한독 계정을 관리할 수 있습니다.

## 3.1 로그인하기

### 바로젠 Care 웹 실행하기

- 1 브라우저를 켜고 바로젠 Care 웹 URL을 입력하세요.  
URL: <https://barozencare.com>
- 2 바로젠 Care 웹 시작화면이 나타납니다.

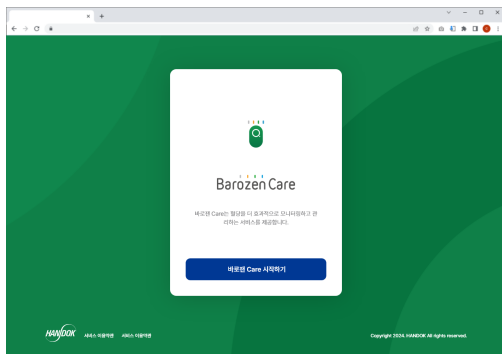

## 회원 가입하기

바로젠 Care의 계정이 없을 경우, 로그인 화면의 회원가입 화면으로 이동하여 회원가입을 완료하세요.

- 1 바로젠 Care 웹 시작화면에서 **바로젠 Care 시작하기**를 클릭하세요.
- 2 (주)한독 계정 로그인 화면이 나타나면 **회원가입**을 클릭하세요.
  - 간편로그인을 선택하여도 (주)한독 계정으로 회원가입이 가능합니다.
  - 간편로그인으로 가입 시 거주국가와 사용자 정보를 입력하고 필수 약관에 동의하면 회원가입이 완료됩니다.

### 참고

필요한 경우, 우측 상단에서 언어를 변경하세요.

- 3 이메일 인증을 진행하세요.

**4** 필수 약관에 동의한 후 **확인**을 클릭하세요.

**5** 비밀번호와 모든 정보를 입력 후 **확인**을 클릭하세요. 회원가입이 완료됩니다.


## 비밀번호 재설정하기

비밀번호를 잊어버리거나 보안상의 이유로 비밀번호 변경이 필요한 경우, 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

- 1 바로젠 Care 웹 시작화면에서 **바로젠 Care 시작하기**를 클릭하세요.
- 2 (주)한독 계정 로그인 화면이 나타나면 **비밀번호 찾기**를 클릭하세요.

- 3 이메일 인증을 진행하세요.

#### 4 새 비밀번호를 설정하세요.

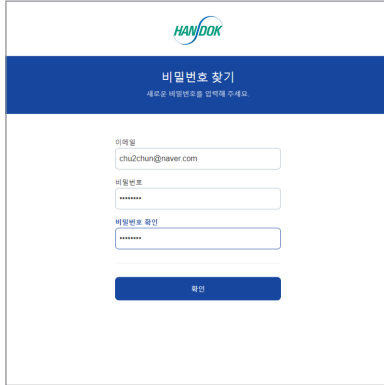

비밀번호 찾기  
새로운 비밀번호를 입력해 주세요.

이메일  
chu2chung@naver.com

비밀번호  
\*\*\*\*\*

비밀번호 확인  
\*\*\*\*\*


확인

#### 5 새로운 비밀번호로 (주)한독 계정 로그인하세요.

## 로그인하기

바로젠 Care의 계정이 있는 경우, 로그인 화면에서 바로젠 Care로 로그인을 하세요.

- 1 바로젠 Care 웹 시작화면에서 **바로젠 Care 시작하기**를 클릭하세요.
- 2 (주)한독 계정 로그인 화면이 나타나면 가입한 이메일과 비밀번호를 입력하세요.
  - 간편로그인으로 회원가입한 경우, 가입 시와 동일한 계정을 선택하세요.

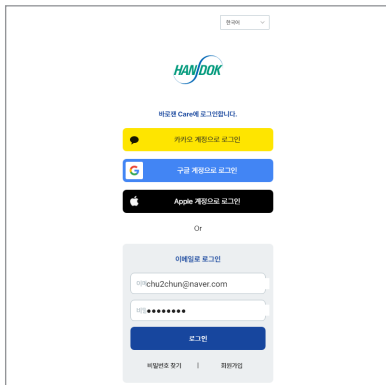

## 로그아웃하기

- 1 로그아웃하려면 화면 우측 상단 프로필을 선택한 후, **로그아웃**을 클릭하세요.




- 2 정상적으로 로그아웃이 완료되면 바로젠 Care 시작화면으로 돌아갑니다.

# 사용자 모드 선택하기

바로젠 Care에 최초로 로그인한 경우, 사용자 모드 선택 화면이 나타납니다.


- 바로젠 Fit 사용자는 센서 사용자 모드를 선택합니다.
- 바로젠 Fit의 건강관리자는 건강관리자 모드를 선택합니다.

**1** 바로젠 Care 웹에 최초로 로그인한 경우, 사용자 모드 선택 화면이 나타납니다.

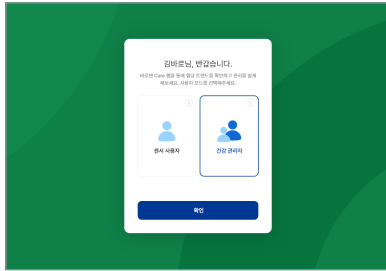


**2** 사용 용도에 맞게 **센서 사용자** 또는 **건강관리자**를 선택하세요.

**3** 센서 사용자는 '보고서'가 첫 화면에 나타납니다.

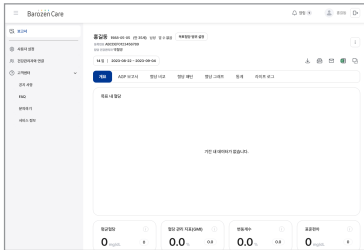


건강관리자는 센서 사용자 리스트가 첫 화면에 나타납니다.

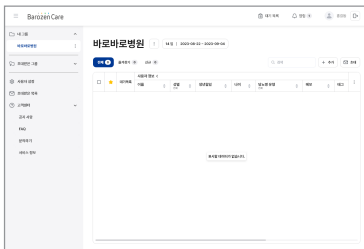


## 3.2 센서 사용자 리스트 확인하기 (건강관리자 모드)

### 리스트에서 센서 사용자 보고서 확인하기

1 좌측에서 그룹을 선택하면 해당 그룹의 센서 사용자 리스트가 나타납니다.

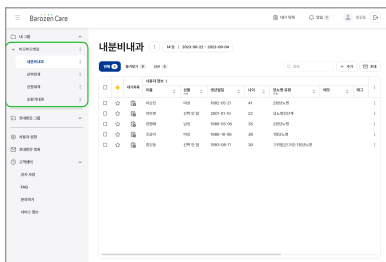


2 센서 사용자 리스트에서 센서 사용자를 선택하면 해당 센서 사용자의 보고서를 확인할 수 있습니다.

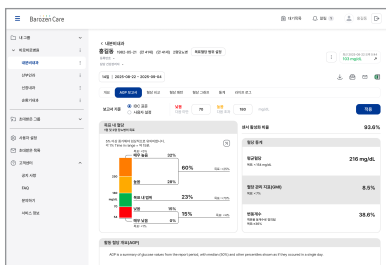


# 즐거찾기 추가하기

센서 사용자 리스트에서 자주 조회하는 센서 사용자를 즐겨찾기 리스트에 추가할 수 있습니다.

- 1 센서 사용자 리스트에서 원하는 센서 사용자 좌측의 ☆을 클릭하세요. 즐겨찾기에 추가되면 ☆이 노란색으로 바뀝니다.

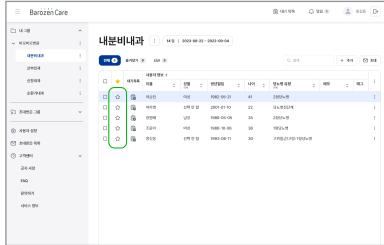

- 2 즐겨찾기 리스트에 센서 사용자가 추가되었는지 확인하세요.

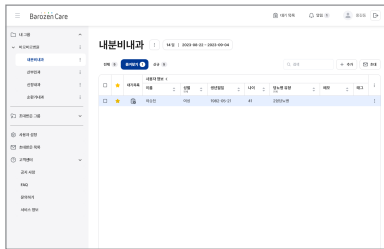

- 3 즐겨찾기에 이미 추가된 센서 사용자의 ☆을 다시 클릭하여 즐겨찾기를 해제할 수 있습니다.


## 대기목록 추가하기

다수의 센서 사용자의 보고서를 신속하게 확인할 수 있도록 바로젠 Care는 대기목록 기능을 제공합니다.


- 1 대기목록은 화면 우측 상단의 대기목록을 클릭하여 확인할 수 있습니다.



- 2 센서 사용자 리스트에서 원하는 사용자의 대기목록 추가를 선택하여 대기목록에 센서 사용자를 추가하세요.

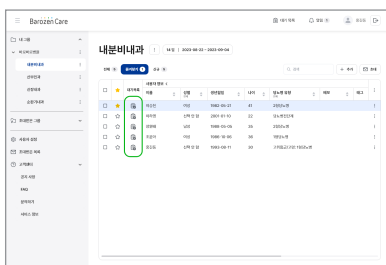

- 3 '대기목록'을 열어 선택한 센서 사용자가 추가되었는지 확인하세요.

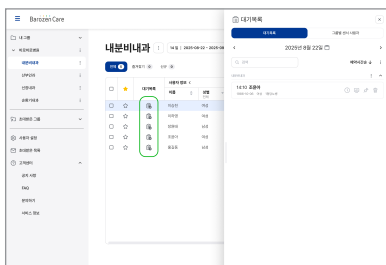

- 4 '대기목록'에서 센서 사용자를 삭제하려면 삭제하고자 하는 센서 사용자 이름 우측의 🗑️를 클릭하세요.

- 5 '대기목록'을 비우려면 비우고자 하는 그룹명 우측의 🗑️를 클릭한 후, 대기목록 비우기를 클릭하세요.


### 🔍 참고

센서 사용자 이름 우측의 ⭐️를 클릭하여 '대기목록'에 센서 사용자를 고정할 수 있습니다. '대기목록'에 고정된 센서 사용자는 목록에서 삭제되지 않습니다.


# 3.3 그룹 관리하기(건강관리자 모드)

## 그룹 추가하기


1 좌측 '내 그룹'에서 **+** 을 클릭한 후, **그룹 추가**를 선택하세요.

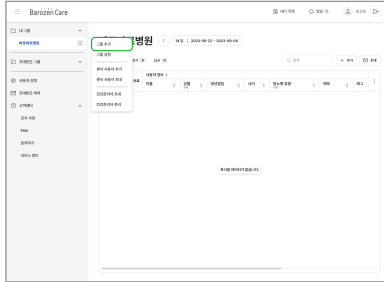

2 추가할 그룹의 이름을 입력하세요.

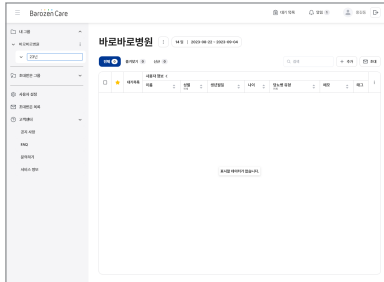


3 입력된 이름으로 그룹이 생성됩니다.

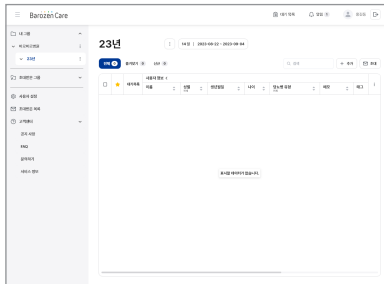

## 그룹명 수정하기


- 1 그룹 이름을 수정하려면 수정하려는 그룹의 **:**을 클릭한 후, **그룹 설정**을 선택하세요.

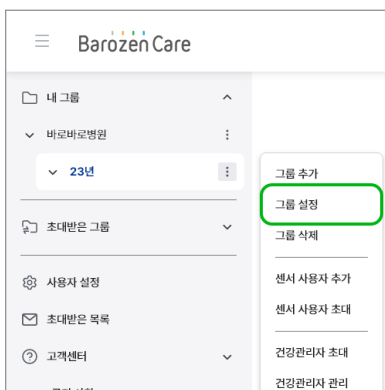

- 2 새로운 그룹명을 입력하고 **저장**을 클릭하세요.

The screenshot shows the '그룹 설정' (Group Settings) form. It has the following fields: '아이디' (ID) with a text input and a '생성' (Create) button; '그룹 유형' (Group Type) with a dropdown menu set to '일반' (General); '그룹 이름' (Group Name) with a text input containing '24년' (2024) and a character count '0/100 X'; and '비밀번호' (Password) with a text input and a character count '0/100'. At the bottom, there are two buttons: '취소' (Cancel) and '저장' (Save), with the '저장' button highlighted in blue.

- 3 수정된 그룹명으로 그룹명이 변경됩니다.

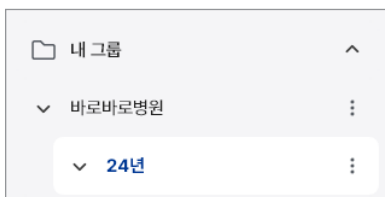


## 센서 사용자 추가하기

- 1 그룹 리스트에 새로운 센서 사용자를 추가하려면 리스트 우측 상단의 **추가**를 클릭하세요.



- 2 추가할 센서 사용자의 웨어코드를 입력하고 **완료**를 클릭하세요.

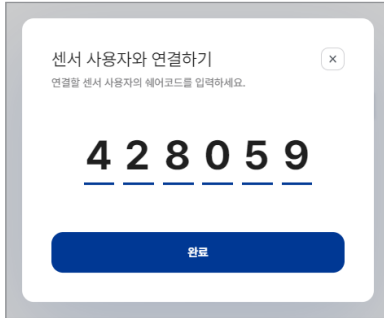


### 🔍 참고

웨어코드는 센서 사용자가 사용하는 바로젠 Fit 앱에서 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 바로젠 Fit 사용설명서를 확인하세요.

- 3 입력한 웨어코드가 유효하면 리스트에 센서 사용자가 추가됩니다.

## 센서 사용자 초대하기

- 1 그룹에 센서 사용자를 초대하려면 그룹의 **⋮** 을 클릭한 후, **센서 사용자 초대** 를 선택하세요.

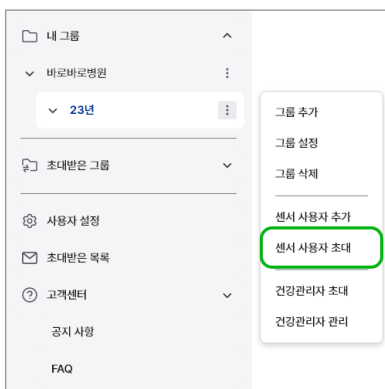

- 2 초대받는 센서 사용자에게 표시될 그룹명을 입력하고 **다음** 을 클릭하세요.

**안내**

현재 그룹명은 추가하는 사람에게 노출됩니다.  
필요한 경우, 그룹명 변경 후 진행해주세요.


변경할 그룹명

8/30 ×


### 참고

입력된 그룹명은 초대받는 센서 사용자에게 노출됩니다.


**3** 생성된 웨어코드를 확인하고 **이메일로 전송** 또는 **카카오톡으로 전송**을 클릭하세요.

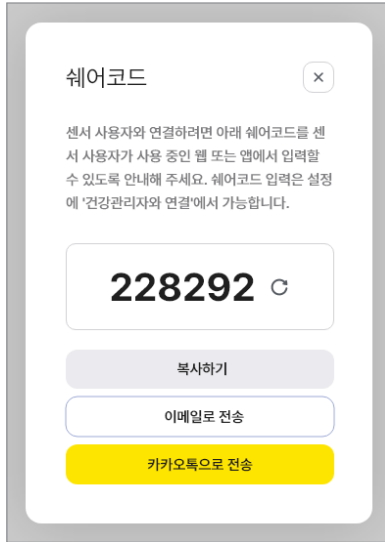

**4** 이메일로 전송하는 경우, 초대하고자 하는 센서 사용자의 이메일을 차례로 입력하고 **전송**을 클릭하세요. 1회에 전송가능한 이메일은 최대 10개입니다.

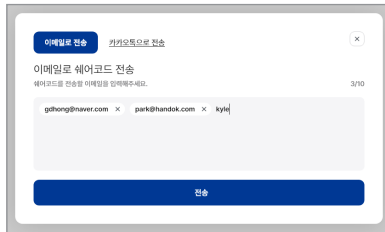


**5** 입력한 이메일로 초대 메일이 발송됩니다.

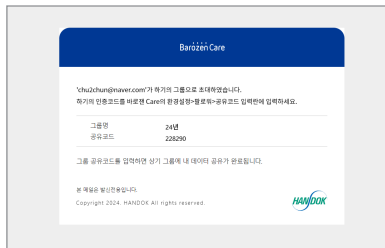

- 6 카카오톡으로 전송하는 경우, 초대하고자 하는 센서 사용자의 전화번호를 차례로 입력하고 **전송**을 클릭하세요. 1회에 전송가능한 카카오톡 메시지는 최대 10개입니다.




- 7 입력한 전화번호로 카카오톡 메시지가 발송됩니다.

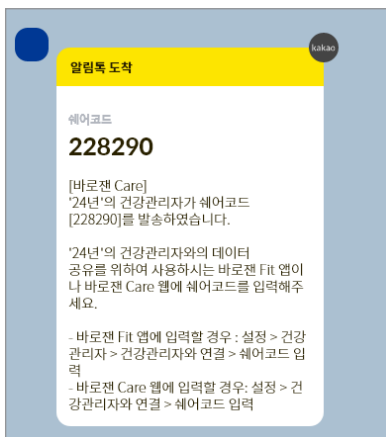


# 건강관리자 초대하기

1 그룹에 건강관리자를 초대하려면 그룹의 **⋮**을 클릭한 후, **건강관리자 초대**를 선택하세요.

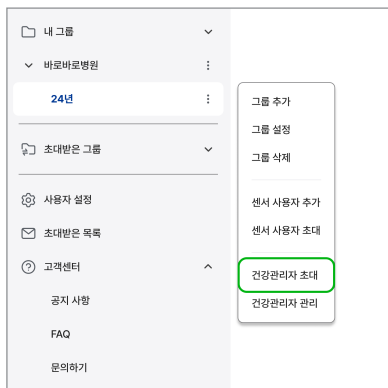


2 초대하는 건강관리자의 이메일을 입력하고 **초대**를 클릭하세요.

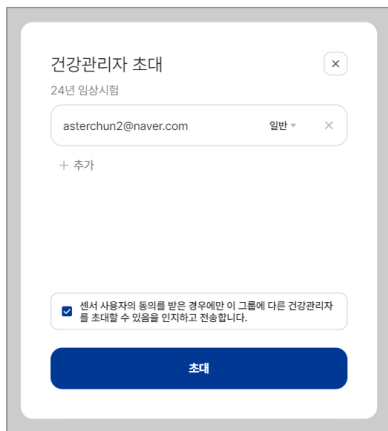


## 건강관리자 관리하기


- 1 그룹의 건강관리자를 관리하려면 그룹의 **⋮** 을 클릭한 후, **건강관리자 관리** 를 선택하세요.

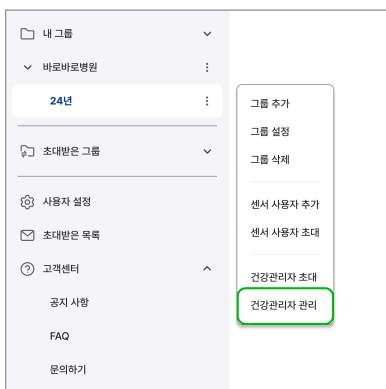

- 2 그룹 건강관리자 관리 리스트에 표시되는 그룹에서 관리할 그룹을 선택하세요.

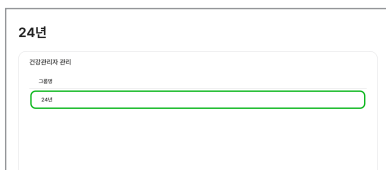

- 3 선택된 그룹에 소속된 건강관리자가 나열됩니다.

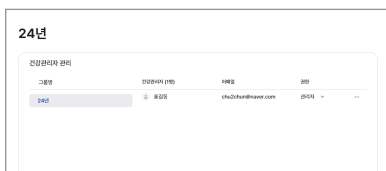

- 4 소속된 건강관리자의 권한을 변경하려면 건강관리자 권한의 ▼ 을 클릭하고 변경할 권한을 선택하세요.



**참고**  
 권한은 '관리자' 권한과 '일반' 권한이 있습니다.

- 5 그룹에서 건강관리자를 삭제하려면 삭제하려는 건강관리자 우측의 ... 을 누르고 그룹에서 내보내기를 선택하세요.




## 그룹 삭제하기


### 참고

그룹 삭제는 해당 그룹에 등록된 센서 사용자가 없어야 삭제할 수 있습니다.

- 1 그룹을 삭제하려면 좌측 '내 그룹'에서 삭제하는 그룹의 **:** 을 클릭한 후, **그룹 삭제**를 선택하세요.

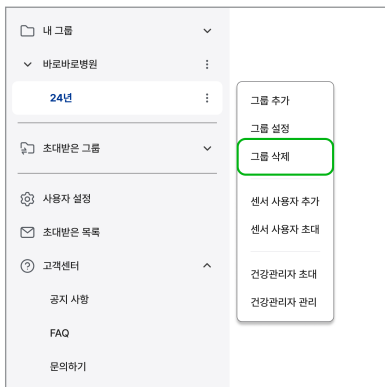


- 2 삭제 확인 팝업이 나타나면 **확인**을 클릭하세요. 해당 그룹이 삭제됩니다.

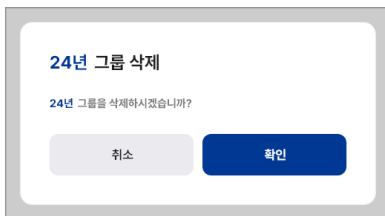

## 3.4 보고서 확인하기

- 1 보고서를 확인하려면 아래 절차를 따르세요.  
 센서 사용자 모드: 좌측 상단의 **보고서**를 선택하세요.  
 건강관리자 모드: 센서 사용자 리스트에서 원하는 센서 사용자의 행을 선택하세요.
- 2 '보고서' 화면이 나타납니다.

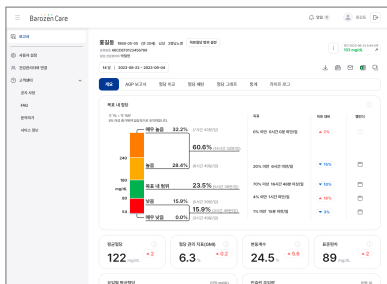

### 참고

- 센서 사용자 모드는 '개요' 보고서 화면이 우선 표시됩니다.
- 건강관리자 모드는 'AGP 보고서' 화면이 우선 표시됩니다.

### 3 각 보고서는 다음과 같은 내용으로 구성됩니다.

보고서	내용
개요	선택된 기간 동안의 다음 정보가 제공됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 목표 내 혈당</li> <li>• 평균혈당</li> <li>• 혈당 관리 지표(GMI)</li> <li>• 변동계수</li> <li>• 표준편차</li> <li>• 요일별 평균혈당</li> <li>• 인슐린 주입량</li> <li>• 센서 활성화 비율</li> <li>• 센서</li> <li>• 플래그별 최저 최고 혈당(손끝 채혈)</li> <li>• 케톤</li> <li>• GKI</li> <li>• 하루 평균 식사량</li> <li>• 하루 평균 운동 시간</li> </ul>
AGP 보고서	선택된 기간 동안의 표준 AGP 보고서가 제공됩니다.
혈당 비교	기간 별 혈당 비교를 위한 테이블과 차트가 제공됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 목표 내 혈당 비교</li> <li>• 혈당 비교(변동계수, 표준편차, 혈당 관리 지표(GMI), 평균혈당)</li> <li>• 혈당 패턴 비교</li> </ul>
혈당 패턴	선택된 기간 동안에 저혈당, 목표 내 혈당, 고혈당이 발생한 구간의 일별 차트와 이벤트 정보를 표시하여 제공합니다.
혈당 그래프	선택된 기간 동안의 일별 차트와 주별 차트를 제공합니다.

보고서	내용
통계	선택된 기간 동안의 다음 정보가 제공됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 요일별 범위 내 시간</li> <li>• 요일별 평균혈당값</li> <li>• 요일별 평균 변동계수</li> <li>• 요일별 평균 센서 활성화 비율</li> <li>• 시간별 범위 내 시간</li> <li>• 시간별 평균혈당값</li> <li>• 시간별 평균 변동계수</li> <li>• 시간별 평균 센서 활성화 비율</li> </ul>
라이프 로그	선택된 기간 동안에 입력된 사용자 이벤트가 표로 제공됩니다.

- 4 보고서를 저장하려면 우측 상단의 ↓ 을 클릭하세요.  
보고서를 선택하여 PDF파일로 저장할 수 있습니다.
- 5 보고서를 인쇄하려면 우측 상단의 🖨 을 클릭하세요.  
보고서를 선택하여 인쇄할 수 있습니다.
- 6 보고서를 이메일로 발송하려면 우측 상단의 ✉ 을 클릭하세요.  
특정 이메일로 보고서 PDF파일을 발송할 수 있습니다

## 3.5 설정하기

### 프로필 정보 변경하기

1 기본 정보를 변경하려면 우측 상단의 프로필 또는 좌측 **사용자 설정**을 클릭하세요.



2 변경 가능한 기본 정보는 다음과 같습니다.

- 이름
- 생년월일
- 성별
- 당뇨병 유형
- 전화번호

3 정보가 변경되면 자동으로 변경된 정보가 저장됩니다.

## (주)한독 계정 관리하기

1 (주)한독 계정을 관리하려면 기본 정보 화면에서 **계정 관리**를 클릭하세요.

**사용자 설정**

기본 정보

ID: chu2chun@naver.com

생년월일: 1988-05-05

성별: 남성

가입일: 2023-05-05

계정 관리

2 **내 정보 관리**를 선택하여 회원 가입 시 입력한 정보를 확인할 수 있습니다.

홍길동  
chu2chun@naver.com

내 정보 관리

비밀번호 변경

연속 서비스 관리

서비스 이용 동의

회원 탈퇴

로그아웃

내 정보 관리

이메일: chu2chun@naver.com

이름: 홍길동


생년월일: 1988-05-05

성별: 남성

확인

## 비밀번호 재설정하기

- 1 계정 비밀번호를 변경하려면 계정 관리 화면에서 **비밀번호 변경**을 클릭하세요.

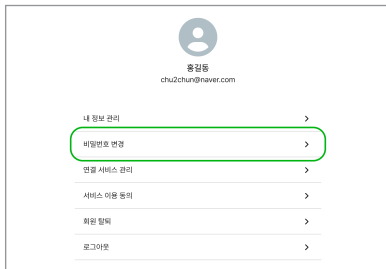


- 2 현재 비밀번호를 입력하고 새로운 비밀번호를 입력하세요.

The screenshot shows the '비밀번호 변경' (Change Password) form. It includes the following elements:
 


- Title: 비밀번호 변경
- Instruction: 현재 비밀번호와 새 비밀번호를 입력해 주세요.
- Field: 현재 비밀번호 (Current Password) with a masked input field (\*\*\*\*\*).
- Field: 새로운 비밀번호 (New Password) with a masked input field (\*\*\*\*\*).
- Field: 비밀번호 확인 (Confirm Password) with a masked input field (\*\*\*\*\*).
- Button: A blue button labeled '확인' (Confirm).

# 연결 서비스 관리하기

1 연결 서비스를 관리하려면 계정 관리 화면에서 **연결 서비스 관리**를 클릭하세요.

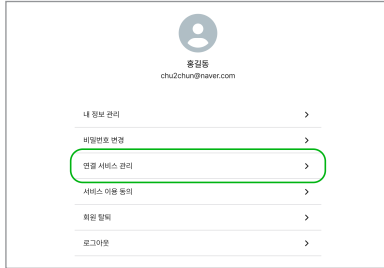


2 현재 계정으로 이용 중인 서비스 목록을 확인할 수 있습니다.

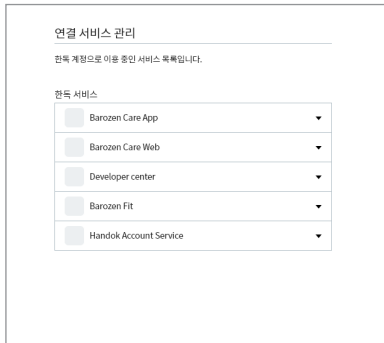


## 회원 탈퇴하기

- 1 (주)한독 계정에서 탈퇴하려면 계정 관리 화면에서 **회원 탈퇴**를 클릭하세요.

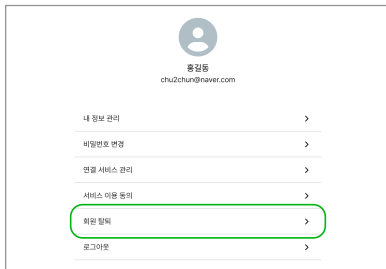


- 2 회원 탈퇴 시 안내를 확인하고 동의 후 **확인**을 클릭하면 회원 탈퇴가 완료됩니다.

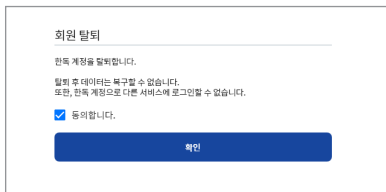


# 사용자 모드 변경하기

1 사용자 모드를 변경하려면 기본 정보 화면에서 **사용자 모드 변경**을 클릭하세요.

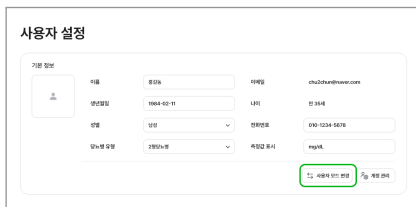

2 사용자 모드 변경 팝업 나타나면 변경할 사용자 모드를 선택하고 **확인**을 클릭하세요.

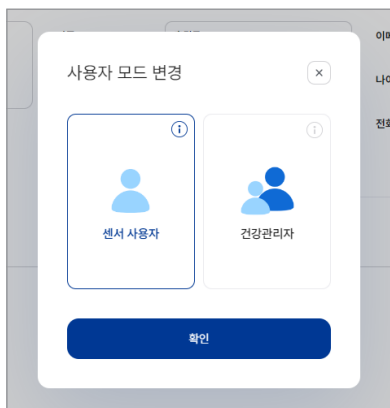

3 변경된 사용자 모드에 맞게 화면 레이아웃이 변경됩니다.

## 나의 데이터 공유하기


### 참고

혈당 데이터 공유를 위한 웨어코드 입력은 '센서 사용자' 모드에서 가능합니다.


- 1 새로운 건강관리자에게 나의 혈당 데이터를 공유하려면 좌측 **건강관리자와 연결**을 클릭하세요. 나의 데이터를 공유 받고 있는 건강관리자 리스트가 나타납니다.



- 2 웨어코드 입력을 위해 우측 상단 **웨어코드 입력**을 클릭하세요.
- 3 데이터를 공유받을 건강관리자의 웨어코드 입력하고 **완료**를 클릭하세요.

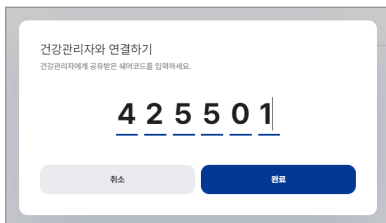


- 4 입력한 웨어코드가 유효한 경우, 건강관리자 리스트에 그룹이 추가됩니다.

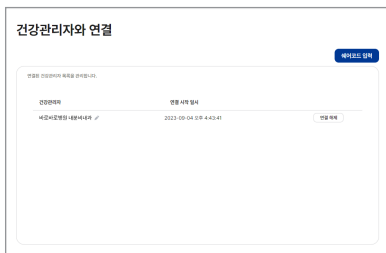

- 5 기존 건강관리자와 공유를 해제하려면 해제하려는 건강관리자 우측의 **연결 해제**를 클릭하세요.




- 6 공유 해제 확인 팝업이 뜨면 **확인**을 클릭하세요. 해당 건강관리자와 공유가 해제됩니다.

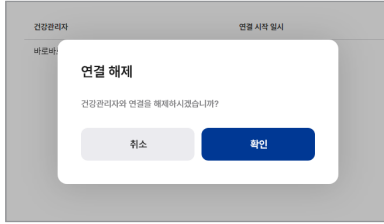


## 받은 초대 수락하기


- 1 그룹에 건강관리자로 초대 받은 경우, '초대받은 목록'에 초대받은 내용이 표시됩니다.

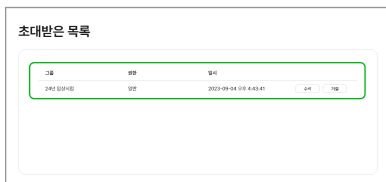


- 2 초대에 수락하려면 **수락**을 클릭하세요.
- 3 수락 확인 팝업이 뜨면 **확인**을 클릭하세요.

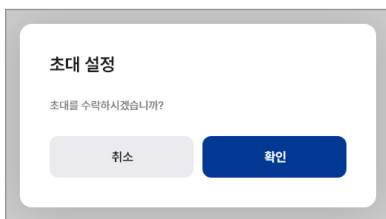

- 4 초대 받은 그룹이 표시됩니다.

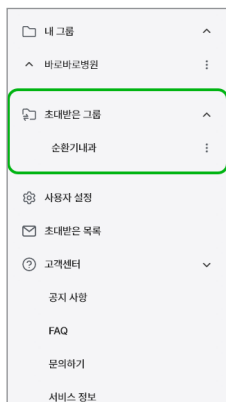


- 5 초대를 거절하려면 **거절**을 클릭하세요.
- 6 거절 확인 팝업이 뜨면 **확인**을 클릭하세요. 초대받은 그룹이 추가되지 않습니다.

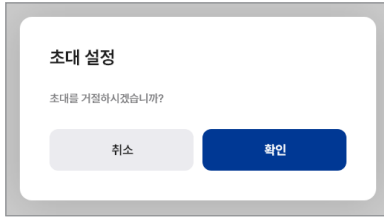

## 언어 변경하기

- 1 언어를 변경하려면 화면 최하단 우측의 를 클릭하세요.
- 2 언어 선택 화면에서 원하는 언어를 선택하세요.

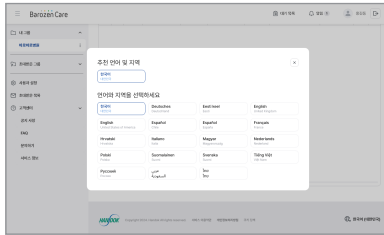

## 당뇨 유형별 기준값 설정하기

- 1 당뇨 목표혈당 범위 설정하기 기준값을 설정하려면 보고서 화면 상단의 **목표혈당 범위 설정**을 선택하세요.
- 2 목표혈당 범위 설정 페이지가 나타나면 목표혈당 범위 섹션에서 구간별 목표혈당을 설정하세요.

구분	목표값	비율
식전	250	5%
식후	180	20%
공복	70-180	70
취침	70	4%
취침	54	1%

시작 시간: 00 : 00 : 00 | 종료 시간: 00 : 00 : 00

취소 | 저장

### 참고

- '초기화'를 클릭하면 당뇨병 유형별 기준값으로 초기화됩니다.
- 목표혈당 범위 설정을 변경하면 센서 사용자의 범위 내 시간에 적용됩니다. (AGP 보고서, 혈당 비교 제외)

- 3 낮과 밤 혈당 기준 적용 시간 변경이 필요하면 주야간 시간 설정 섹션에서 주간, 야간 시작 시간을 설정할 수 있습니다.

# AGP 보고서 기준 설정

- 1 AGP 보고서의 기준 범위를 설정하기 위해서는 보고서 화면에서 **AGP 보고서**를 선택하세요.
- 2 화면 상단의 보고서 기준을 사용자 설정으로 설정하면 낮음, 높음 기준을 변경할 수 있습니다.



- 3 적용을 클릭하면 화면의 AGP 보고서가 설정된 값을 기준으로 표시됩니다.

# 부록 A 기술정보

## A.1 성능

<p>호환 가능한 의료기기</p>	<p>허가번호: 제허 23-690 호          품목명: 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템          제품명: 바로젠 Fit          모델명: CGM-ST-003</p>
<p>통신 환경</p>	<p>통신 프로토콜: HTTPS</p>
<p>운영 환경</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>권장 브라우저: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari</li> <li>해상도: 1280 x 800 px 이상</li> </ul>
<p>송수신 데이터</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>호환 가능한 의료기기 사용자의 연속혈당값, 사용자 입력 데이터(식사, 인슐린, 운동 등)</li> <li>호환 가능한 의료기기 사용자의 혈당을 포함한 사용자 데이터 통계 및 보고서</li> </ul>
<p>주요 성능</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>호환 가능한 의료기기 사용자의 연속혈당값 및 사용자 입력 데이터를 표시</li> <li>호환 가능한 의료기기 사용자의 데이터에 대한 통계 표시 및 보고서 저장</li> <li>호환 가능한 의료기기 사용자의 혈당 알림 표시</li> <li>앱을 사용하는 건강관리자(가족, 보호자, 의료기간)는 호환 가능한 의료기기 사용자의 사용자 앱과 연결을 통해 데이터를 공유 받음</li> </ul>
<p>소프트웨어 버전</p>	<p>제품명: 바로젠 Care          모델명: HS-FE-03          버전: 1.0.x</p>

## 기타 표시기재사항

### 의료기기

1. 제품명: 바로젠 Care
2. 제조업자: (주)아이센스  
서울특별시 서초구 반포대로28길 43
3. 신고번호: 제신 23-1346 호
4. 품목명: 1등급 유헬스케어 게이트웨이 소프트웨어
5. 모델명: HS-FE-03

## A.2 사이버보안

### 사이버보안 관련 주의사항

- 스마트 기기, Windows, Mac OS 및 태블릿에서 바이러스 방지 또는 백신 프로그램을 설치하여 악성 프로그램이 스마트 기기의 정보에 접근하지 않도록 해야 합니다.
- 웨어코드를 입력하여도 (주)한독이 판매하는 개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 사용자 혈당 정보를 전송 받지 못할 경우, 전달된 웨어코드 6자리를 정확하게 입력하였는지 확인해야 합니다. 웨어코드를 정확하게 입력하여도 동일 문제가 반복될 경우 (주)한독 고객센터(080-850-5001)로 문의하세요.
- 다른 기기에서 접속하여 로그인 시, 본인이 접속한 경우가 아닌 경우 비밀번호를 변경하세요.
- 비밀번호 입력이 5회 이상 실패한 경우, 비밀번호를 재설정하세요.
- 1년간 로그인이 되지 않은 계정은 휴면 계정으로 전환됩니다. 휴면 계정으로 전환된 경우, 휴면 계정 해제가 필요합니다.
- 바로케어 Care 관련 사이버 보안 사고가 발생할 시 (주)한독 고객센터(080-850-5001) 및 관할 기관에 문의하세요.

### 사이버보안 관련 안전사항

- 자격 증명을 확인하여 유효한 경우, 사용자에게 토큰을 발급합니다.
- 요청을 받을 때마다 토큰을 검증하여 유효한지 확인하고, 인증을 처리합니다.
- 데이터 전송 시 SSL 통신방법을 사용합니다.
- 개인 정보 데이터는 AES 인코딩으로 암호화되어 DB에 저장됩니다.
- 비밀번호 입력이 5회 이상 실패한 경우, 비밀번호를 재설정해야 합니다.
- 1년간 로그인이 되지 않은 계정은 휴면 계정으로 전환됩니다. 휴면 계정으로 전환된 경우, 휴면 계정 해제가 필요합니다.





판매업자: ㈜한독

서울시 강남구 테헤란로 132

고객센터: 080-850-5001

[www.barozenfit.com](http://www.barozenfit.com)

**부작용 보고 관련 문의처**

한국의료기기안전정보원  
080-080-4183